

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen danken und freuen uns, daß Sie sich für ein Produkt von delego entschieden haben. Als Hauptlieferant und Vertriebspartner für Deutschland freuen wir uns, Ihnen mit dem Calidus® Wärmesystem ein Produkt von hoher Qualität, Sicherheit und einfacher Bedienung zu übergeben.

Wir möchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme Ihres neuen Wärmesystems die Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durchzulesen und zu beachten.

Technische Änderungen und Verbesserungen des Produktes behalten wir uns vor.

Ihr delego Team



## Ihr Know-How-Partner für Sitz- und Liegesysteme

Stand: 09.2015

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Alle Bilder und Texte unterliegen dem Urheberschutz und dürfen ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht veröffentlicht werden – auch nicht auszugsweise.



Bedienungsanleitung

Carl-Zeiss-Str. 42 | 47445 Moers | [delego.biz](http://delego.biz)  
Tel. (02841) 9 99 69 80 | Fax (02841) 9 99 69 88

© delego 2015



**CALIDUS**®

Wärmesystem für Sitz- und Liegeschalen,  
Orthesen und Positionierungshilfen

## Indikation und therapeutischer Nutzen

Mit Hilfe der Calidus-Wärmeelemente wird versucht, den Körper mit direkter Wärme zu versorgen und so die Kältebrücke zu umgehen. Dies bringt weitere Vorteile, die auch therapeutischen Nutzen haben:

- Senkung des Muskeltonus und entspannen der Muskulatur
- vermindertes Schwitzen
- Luftzirkulation

Die Wärmeelemente (1-6 Stück) können individuell in Positionierungshilfen adaptiert werden. Das Calidus-Wärmesystem kann somit an gezielten Stellen punktuell oder flächig das Wohlbefinden steigern, den Muskeltonus reduzieren und Spastiken verhindern oder deren Intensität senken.

**Hinweis: Nach heutigem Stand sind uns keine Kontraindikationen bekannt.**

## Indikationen

- Kälteempfindlichkeit
- Rheumatische Erkrankungen
- Muskelhypertonie

## Handhabung bei Anlieferung

### Aufladen des Akkugerätes


Laden Sie hierzu das mitgelieferte Akkugerät/Steuerung am Stromnetz 230V auf, bis das grüne Licht erscheint. Schließen Sie danach das Gerät am Heiz-

kissen an und setzen Sie es zur sicheren Aufbewahrung in die zugehörige Tasche ein.



### Inbetriebnahme

Die Akkuleistung und die Umgebungstemperatur entscheidet über die Anwendungsdauer. Je wärmer die Sitzheizung eingestellt wird, desto kürzer die Dauer der Wärmeabgabe.

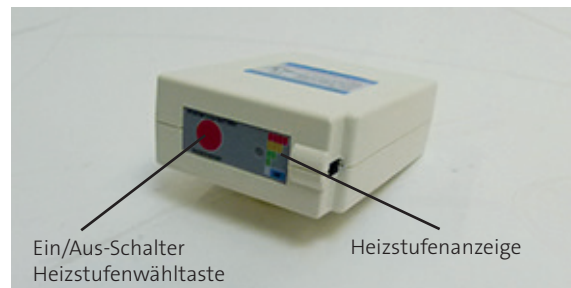

### Vierstufige Wärmeregulierung

Stufe	Temperatur	Dauer Wärmeabgabe
Stufe 1 Rot	48 - 52 °C	ca. 10 Min. (Aufwärmphase)
Stufe 2 Orange	42 - 45 °C	ca. 4,5 Std.
Stufe 3 Grün	34 - 38 °C	ca. 7 Std.
Stufe 4 Grün (blinkend)	30 - 35 °C	ca. 12 Std.

Die Dauer der Wärmeabgabe, kann auf Grund der angeschlossenen Wärmeelemente (1-6 Stück je Akku-Einheit) variieren.

## Adaption in Sitz- und Liegeschalen, Orthesen und Positionierungshilfen



Die Calidus-Wärmeelemente sind mittels Klett oberflächlich auf dem Polstermaterial anzubringen. Das Polstermaterial ist zum Verlegen der Kabelverbindungen ca. 1cm tief einzuschneiden. Die Wärmeelemente sind abschließend mit einem max. 2mm dünnem luftdurchlässigem Material abzudecken. Luftundurchlässiges Material (Bezugsstoff) kann zu Wärmestau führen, woraufhin die Sensoren das System abschalten.

### Zusätzliche Hinweise

**ACHTUNG:** Für Schäden aufgrund von Kombinationen unseres Wärmesystems mit Fremdprodukten jeglicher Art, die nicht den Richtlinien für Medizinprodukte der Klasse 1 (Regel 1 des Anhangs IX-93/42/EWG) entsprechen und unter Umständen erhebliche Gefahren in sich bergen, können wir keine Haftung übernehmen. Es sei denn, dass eine ausdrückliche Freigabe eines solchen Produktes durch unser Haus vorliegt.