

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen danken und freuen uns, daß Sie sich für ein Produkt von delego entschieden haben. Als Hauptlieferant und Vertriebspartner für Deutschland freuen wir uns, Ihnen mit der Calidus® Rollstuhlsitzheizung ein Produkt von hoher Qualität, Sicherheit und einfacher Bedienung zu übergeben.

Wir möchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme Ihrer neuen Sitzheizung die Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durchzulesen und zu beachten.

Technische Änderungen und Verbesserungen des Produktes behalten wir uns vor.

Ihr delego Team



Ihr Know-How-Partner für Sitz- und Liegesysteme

Stand: 09.2015

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Alle Bilder und Texte unterliegen dem Urheberschutz und dürfen ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht veröffentlicht werden – auch nicht auszugsweise.



Bedienungsanleitung

Carl-Zeiss-Str. 42 | 47445 Moers | delego.biz
Tel. (02841) 9 99 69 80 | Fax (02841) 9 99 69 88

© delego 2015



CALIDUS®

Die Sitzheizung für Rollstühle

Indikation und therapeutischer Nutzen

Mit Hilfe der Calidus-Rollstuhlsitzheizung wird versucht, den Körper mit direkter Wärme zu versorgen und so die Kältebrücke zu umgehen. Dies bringt weitere Vorteile, die auch therapeutischen Nutzen haben:

- Senkung des Muskeltonus und entspannen der Muskulatur
- vermindertes Schwitzen
- Luftzirkulation

Das Heizkissen kann durch seine verschiedenen Wärmestufen zur Tonussenkung eingesetzt werden und somit Spastiken verhindern oder deren Intensität senken.

Hinweis: Nach heutigem Stand sind uns keine Kontraindikationen bekannt.

Indikationen

- Kälteempfindlichkeit
- Rheumatische Erkrankungen
- Muskelhypertonie

Handhabung bei Anlieferung


Aufladen des Akkugerätes

Laden Sie hierzu das mitgelieferte Akkugerät/Steuerung am Stromnetz 230V auf, bis das grüne Licht erscheint. Schließen Sie danach das Gerät am Heizkissen an und setzen Sie es zur sicheren Aufbewahrung in die zugehörige Tasche ein.



Inbetriebnahme

Die Akkuleistung und die Umgebungstemperatur entscheidet über die Anwendungsdauer. Je wärmer die Sitzheizung eingestellt wird, desto kürzer die Dauer der Wärmeabgabe.

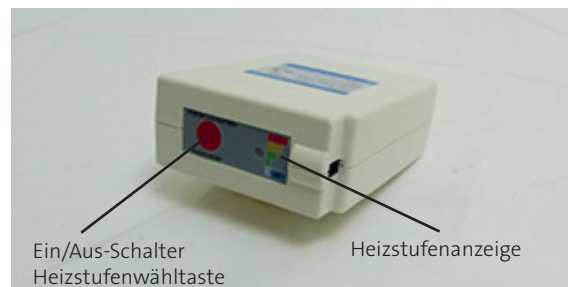

Vierstufige Wärmeregulierung

Stufe	Temperatur	Dauer Wärmeabgabe
Stufe 1 Rot	48 - 52 °C	ca. 10 Min. (Aufwärmphase)
Stufe 2 Orange	42 - 45 °C	ca. 4,5 Std.
Stufe 3 Grün	34 - 38 °C	ca. 7 Std.
Stufe 4 Grün (blinkend)	30 - 35 °C	ca. 12 Std.

Anbringen am Rollstuhl



Zum Anbringen des CALIDUS Heizkissens am Rollstuhl, legen Sie einfach das Heizkissen über Ihre Rückenbespannung und ggf. Ihr Sitzkissen. Zur Befestigung des Heizkissens am Rücken des Rollstuhls, ziehen Sie den Gurt unterhalb der Griffe durch die Plastiklaschen und ziehen diese fest. Somit ist das Heizkissen am Rücken befestigt.

Zusätzliche Hinweise

ACHTUNG: Für Schäden aufgrund von Kombinationen unseres Sitzheizkissens mit Fremdprodukten jeglicher Art, die unter Umständen erhebliche Gefahren in sich bergen, können wir keine Haftung übernehmen. Es sei denn, dass eine ausdrückliche Freigabe eines solchen Produktes durch unser Haus vorliegt.